


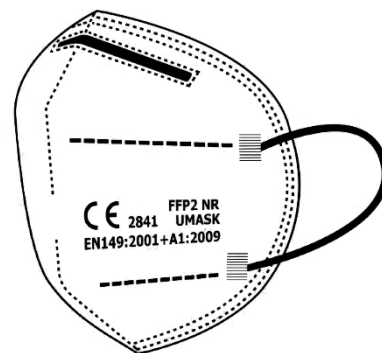

FFP2 MAK

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

- Conservare in un luogo asciutto e pulito nella confezione originale, al riparo dalla luce solare diretta o da alte temperature e vapori di solventi.
- Conservare in un ambiente con una temperatura compresa tra -5° C e +25° C e un'umidità relativa inferiore all'80%.
- La durata di conservazione della maschera è di tre anni dalla data di fabbricazione.
- Se la maschera è danneggiata e sporca, sostituirla. La maschera deve essere sostituita in conformità con le normative di lavoro.
- In caso di utilizzo prolungato, quando la respirazione diventa difficoltosa, sostituire la maschera.
- Smaltire con cura la maschera usata tenendola per i passanti auricolari.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Aprire la busta e tirare verso l'esterno le fasce dei passanti auricolari su entrambe le estremità.
- Posizionare la maschera sul viso con la clip metallica regolabile rivolta verso l'alto.
- Tirare le fasce dei passanti auricolari e posizionarle intorno alle orecchie.
- Premere verso il basso la clip nasale con entrambe le mani per garantire una tenuta aderente attorno al naso. La maschera è prodotta esclusivamente per un uso singolo. Non utilizzare la maschera più di una volta.



VERIFICA DELL'USO

- Dopo aver indossato la maschera, coprirla con entrambe le mani.
- Espirare profondamente e bruscamente.
- Se l'aria fuoriesce dal naso, regolare di nuovo la clip nasale.

- Se l'aria fuoriesce dai lati, riallacciare gli elastici auricolari intorno alle orecchie.
- Se la maschera non si adatta correttamente al viso, non entrare in aree pericolose.

AVVERTENZE E RESTRIZIONI

- Gli utenti devono leggere il manuale di istruzioni e assicurarsi di controllare la corretta vestibilità.
- La mancata osservanza di tutte le istruzioni per l'uso o il mancato utilizzo corretto della maschera per tutta la durata dell'esposizione possono influire negativamente sulla salute dell'utente.
- Seguire le normative locali e rivedere i requisiti di utilizzo dipendenti dal campo o consultare un professionista della sicurezza.
- L'utente deve essere formato sull'uso della maschera in conformità con gli standard di salute e sicurezza applicabili.
- Le maschere FFP2 non proteggono da gas e vapori.
- Il tasso di ossigeno nell'ambiente in cui viene utilizzata la maschera non deve essere inferiore al 19%.
- Le maschere FFP2 non proteggono da inquinanti atmosferici/concentrazioni pericolose (IDLH).
- Poiché non sono noti gli effetti dei prodotti sulla natura, le maschere devono essere smaltite solo nella spazzatura.
- La presenza di peli sul viso e della barba potrebbe compromettere la necessaria tenuta tra il viso e la maschera.
- Se si avvertono vertigini o se la respirazione diventa difficoltosa nell'area contaminata, abbandonare immediatamente l'ambiente.
- Non apportare modifiche alla maschera.