



Mascherina FFP2 bianca



NOME PRODOTTO

Mascherina FFP2 bianca

CODICE PRODOTTO

MD-FFP2

DESCRIZIONE PRODOTTO

Mascherina FFP2 con elastici auricolari, pieghevole. Confezione singola.
Ergonomica, adatta a tutti i tipi di viso. Grande superficie filtrante
Nasello regolabile posto all'interno degli strati del materiale filtrante nickel-free.

Resistenza respiratoria ≤ 300 Pa.
Portata d'aria ≥ 95 l/min.
Capacità di filtrazione garantita $> 98\%$.
Latex free.

DESTINAZIONE D'USO

Settore dentale, ospedaliero-medico, RSA, industria alimentare e HoReCa, industria e pulizia, cosmesi ed estetica, veterinario, settore automotive, settore antiterroristico e settore dei tatuatori.

CATEGORIA DI RISCHIO DPI

DPI di III categoria. Conformità al regolamento (UE) 2016/425

CERTIFICATO CE DPI N°

DK-PPE001973 i01 - scad. 10/11/2030

ORGANISMO NOTIFICATO DPI

TÜV SÜD DANMARK ApS, Johanne Møllers Passage 1, 3. sal • 1799 Copenhagen V • Denmark (Organismo notificato n° 2443)

Caratteristiche tecniche

CODICE EAN

8055719540103

COLORE

Bianco

MATERIA PRIMA

Cinque strati: polipropilene / polipropilene / polipropilene / polietilene & polietilene tereftalato / polipropilene

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza respiratoria ≤ 300 Pa. Portata d'aria ≥ 95 l/min. Capacità di filtrazione garantita $> 98\%$.

AVVERTENZE

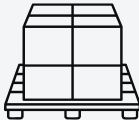
Non sterili. Non destinati ad essere sterilizzati prima dell'uso.

- Non utilizzare maschere protettive o entrare o rimanere in un'area contaminata nelle seguenti circostanze:
 - L'atmosfera contiene meno del 19,5% di ossigeno
 - Se senti odore o sapore contaminato
 - Per la protezione da gas o vapori
 - Contaminanti o le loro concentrazioni sono sconosciuti o immediatamente pericolosi per la vita o la salute
 - Per operazioni di sabbiatura, pittura spray e amianto
 - In atmosfera sottomarina, incendio ed esplosiva
- Non modificare o utilizzare in modo improprio la maschera
- Non utilizzare la maschera protettiva con i peli del viso o qualsiasi altra condizione che possa impedire una buona tenuta del viso.

NORME DI RIFERIMENTO

DPI di III Categoria in conformità al regolamento (UE) 2016/425
EN 149:2001+ A1:2009 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	Singola unità	Confezionamento primario	Confezionamento secondario	Pallettizzazione
	1 pezzo 	40 pezzi 	2.000 pezzi (50 box) 	10 cartoni 
	Busta stampata	Box in cartoncino	Cartone ondulato	Pallet in legno 80x120x210 cm

ISTRUZIONI D'USO	1. Rivolgere la maschera in modo che il clip per per il naso si trovi verso l'alto. 2. Tenere la maschera sul viso con le mani e posizionarla contro il mento con il lato con le scritte rivolto verso l'esterno. 3. Posizionare gli elastici dietro le orecchie. 4. Posizionare le dita di entrambe le mani al centro del fermaglio nasale in metallo, mentre si preme verso l'interno, spostare le punte delle dita su entrambi i lati lungo il fermaglio nasale finché il fermaglio nasale non è completamente premuto nella forma del ponte del naso. Controllo della vestibilità: a. Per testare l'aderenza della maschera protettiva, avvolgere entrambe le mani sul respiratore e inspirare energicamente. Se si avverte un flusso d'aria nell'area del naso, regolare o stringere nuovamente la clip. b. Cambiare immediatamente la maschera se la respirazione diventa difficile o la maschera viene danneggiata o distorta. c. Cambiare la maschera se non è possibile ottenere una corretta tenuta del viso.
------------------	---

STOCCAGGIO	Conservare al riparo da sorgenti inquinanti, calore ed umidità. Conservare ad una temperatura tra -5°C e +38°C.
------------	---

SMALTIMENTO	Il dispositivo, al termine del suo utilizzo, deve essere trattato secondo le vigenti normative in materia in funzione del campo di applicazione in cui è stato impiegato.
-------------	---

VALIDITÀ	5 anni dalla data di produzione
----------	---------------------------------

FABBRICANTE	MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38M - Saluzzo - CN - ITALY
-------------	--

LUOGO DI PRODUZIONE	Cina
---------------------	------

IMPORTATORE	MED Consulting S.r.l. - Via Revello 38M - Saluzzo - CN - Italy
-------------	--

